


ControlCOCKPIT Indstilling og programmering

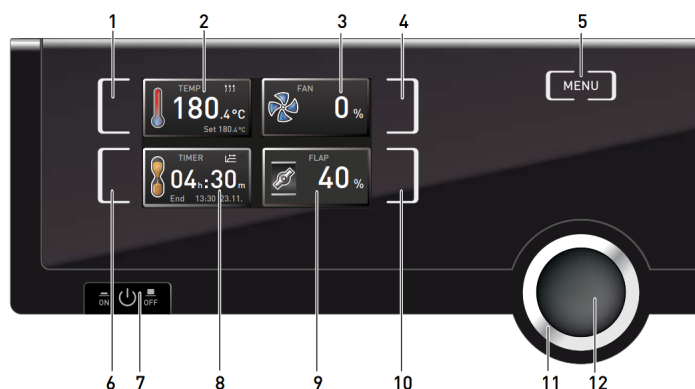


1. Tænd sterilisatoren på on/off knappen (7)
2. Temperatur (2)
 - a) Tryk på (1), der aktiverer temperaturindstilling
 - b) (11) anvendes til at vælge temperatur, drej knappen til højre for at øge og til venstre for at sænke temperaturen. Når den ønskede temperatur vises i displayet, tryk (12) for at gemme.
3. Tid (8)
 - a) Tryk på (6) for at aktivere tidsindstilling.
 - b) Brug igen (11) til at vælge tid, og (12) for at gemme.
 - c) Tiden starter først, når sterilisatoren har opnået den ønskede temperatur.
4. Sluk efter brug på on/off (7)
5. Næste gang sterilisatoren tændes, vil indstillingerne være som sidst anvendt.

Menu (5) anvendes til indstilling af dato, klokkeslæt, enheder, sprog med mere. Standard sprog er engelsk.

Fan (3) kontrollerer hastighed af indvendig propel, der øger luftflow. 0 - 100 %. Som standard anbefales 100 %.

Flap (9) til kontrol af luftudskiftningen. 0 % = lukket 100 % = helt åben. Som standard anbefales 0 %.

Pak ovnen, så luften kan komme rundt.

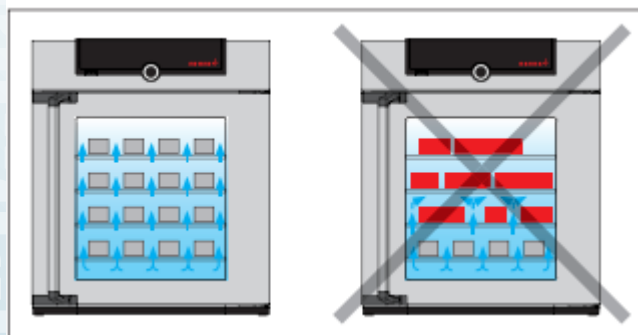

TØRSTERILISATION: TEMPERATUR OG TID

Godkendt sterilisation af genanvendelige instrumenter i henhold til WHO:

- 160 °C i 120 min
- 170 °C i 60 min
- 180 °C i 30 min

Til instrumenter af rustfrit stål anbefales 160 °C i 120 minutter, da det forlænger instrumenternes levetid frem for de højere temperaturer, der kan beskadige overfladen.

Kilde: NIR, Sterilisation i almen praksis, side 26.